

000/0020.123/30



# Hydroskin Metaldetect, pansement imperméable bleu avec Hydrogel

Hydroskin Metaldetect est surtout utilisé dans l'industrie alimentaire vu sa couleur bleue et sa bande métallique détectable.



## Propriétés

- Dimensions: 7.5 x 4.5 cm.
- Pansement Hydrogel non adhérent qui absorbe légèrement le suintement excédentaire.
- Film bleu souple, composé de polyuréthane permettant à la plaie de respirer tout en arrêtant les bactéries.
- Fournit un environnement humide à la plaie.
- Peut être retiré sans douleur.
- Imperméable à l'eau.
- Absorbe les chocs.
- La bande métallique se trouve sous la compresse. Métal détectable. Si, pendant le processus de production, un Hydroskin Metaldetect tombe dans le produit, on peut le détecter à l'aide d'un appareil de détection grâce à la bande métallique détectable et ainsi l'enlever.
- Emballé individuellement.

## Applications

- Usage unique.
- Pour soigner la peau en cas de coupures ou d'écorchures superficielles.
- Ne convient pas aux plaies saignant fortement, aux plaies ouvertes, profondes ou infectées.
- Peut être utilisé dans l'industrie agroalimentaire.

## Utilisation

- Nettoyer d'abord la blessure.
- Ouvrir l'emballage.
- Enlever la première moitié de l'ailette de protection.
- Appliquer le pansement à l'endroit souhaité.
- Enlever ensuite la deuxième moitié de l'ailette de protection.
- Serrer bien autour de la blessure.
- Enlever les films protecteurs supérieurs en papier.
- Contrôler régulièrement la blessure et remplacer le pansement au besoin.
- Enlever le pansement en détachant un coin. Etirer le pansement parallèlement à la peau.



## Contenu

40 unités

## Préservation

- Date d'expiration: 36 mois après la date de production.
- A conserver à température ambiante (entre 10 et 25°C) et dans un endroit sec et sombre.

Ce produit est un dispositif médical de classe I portant le marquage CE.

**Version: 03/05/2024**