

000/0020.124/20



# Hydroskin, pansement imperméable avec Hydrogel

Hydroskin est un pansement transparent avec Hydrogel.



## Propriétés

- Dimensions: 7.5 x 4.5 cm ovale.
- Compresse en Hydrogel non adhérente (contient 30% d'eau) qui absorbe légèrement le suintement excédentaire.
- Film transparent, composé de polyuréthane permettant à la plaie de respirer tout en arrêtant les bactéries.
- Fournit un environnement humide à la plaie.
- Hypoallergénique.
- Peut être retiré sans douleur.

## Applications

- Coupures et écorchures superficielles.
- Ampoules.
- Ne convient pas aux plaies saignant fortement, aux plaies ouvertes, profondes ou infectées.
- Usage unique.

## Utilisation

- Appliquer sur une peau sèche et propre.
- Suivre la numérotation.
- Lisser le film adhésif.
- Contrôler régulièrement la blessure et remplacer le pansement au besoin.
- Ampoules : attendre que le pansement se détache spontanément.



## Contenu

Boîte 24 pièces

## Préservation

- Date d'expiration: 36 mois après la date de production.
- A conserver à température ambiante (entre 10 et 25°C) et dans un endroit sec et sombre.

Ce produit est un dispositif médical de classe I portant le marquage CE.

**Version: 18/05/2024**