



000/0060.040/20

Coohy, compresse Hydrogel refroidissante

Coohy est un pansement Hydrogel riche en eau et non collant.



Propriétés


- Dimensions: 6.5 x 5 cm.
- Contient jusqu'à 70% d'eau.
- Effet refroidissant.
- Compresse en Hydrogel non adhérente qui absorbe légèrement le suintement excédentaire.
- Fournit un environnement humide à la plaie.
- Transparent.
- Peut être enlevée sans douleur.

Applications

- Usage unique.
- Pour soigner la peau échauffée, les coupures et écorchures peu exsudatives.
- Ne convient pas aux plaies saignant fortement, aux plaies ouvertes, profondes ou infectées.

Utilisation

- Enlever les films protecteurs blancs et appliquer le Coohy sur la blessure.
- Conserver le film transparent attaché sur la face supérieure du Coohy: cela assure que le Coohy reste non collant.
- Fixer le Coohy avec un pansement ou sparadrap.
- Contrôler régulièrement la blessure et remplacer le Coohy si nécessaire après 3 et jusqu'à 5 jours au plus tard.

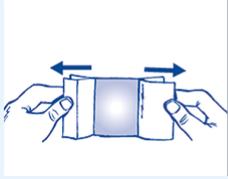

Contenu

Boîte 12 pièces

Préservation

- Date d'expiration: 36 mois après la date de production
- A conserver à température ambiante (entre 10 et 25°C) et dans un endroit sec et sombre.

Ce produit est un dispositif médical de classe I portant le marquage CE.

Version: 04/05/2024