

000/0060.042/20



Coohy Fingertip, pansement refroidissant avec Hydrogel.

Coohy Fingertip est un pansement non-collant avec compresse Hydrogel riche en eau. Le pansement innovateur crée un refroidissement continu et unique: cooling all around. Convient à l'usage dans l'industrie agro-alimentaire vu la couleur bleue et la bande métallique détectable.



Propriétés

Dimensions 9.5 x 13.5 cm. Pansement bleu élastique. L'Hydrogel refroidit la peau échauffée, calme ainsi la douleur et absorbe le suintement excédentaire. L'action refroidissante se fait par:

Ø L'écart de température entre le gel et la peau. La température du gel de 31°C refroidit et calme la peau échauffée..

Ø L'eau du gel a une capacité d'échauffement, c'est-à-dire que le gel a besoin d'énergie thermique pour augmenter de température afin d'atteindre celle du corps. Ce processus prend environ 30 à 45 minutes et a comme résultat que le gel continue à être froid au toucher.

Ø Même si le Coohy Fingertip a une température de 31°C, l'eau du gel peut s'évaporer. Dans ce cas également, le gel a besoin d'énergie thermique et celle-ci provient de la peau. Voilà pourquoi le Coohy Fingertip continue à être froid au toucher plusieurs heures après son application.


Modèle innovateur, spécifiquement développé pour les doigts et leurs extrémités. Le pansement innovateur garantit un refroidissement continu du doigt entier: cooling all around. Modèle déposé par MExT. Radiodétectable. Hypoallergénique. Peut être enlevé sans douleur. Produit à usage unique.

Applications

- Pour soigner: les coupures et écorchures peu exsudatives, les brûlures du premier degré,
- la peau échauffée et déshydratée. NE convient PAS pour des plaies saignant abondamment ni pour des plaies profondes ou infectées. NE convient PAS pour des brûlures du deuxième et troisième degré.

Utilisation

- Appliquer un doigtier MEXT bleu au dessus de Coohy Fingertip pour protéger de l'eau et des micro-organismes.
- Dès que l'action refroidissante a disparu, appliquer une pommade nourrissante et apaisante sur la peau brûlée ou irritée (par exemple Flamex) ou appliquer un nouveau pansement Coohy Fingertip pour prolonger la phase de refroidissement.

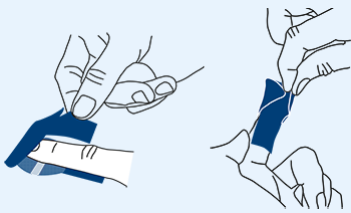

Contenu

- 6 unités.

Préservation

- A conserver à température ambiante et à l'abri de l'humidité.
- Date d'expiration: 36 mois après la date de fabrication.
- Voir emballage individuel.

Coohy Fingertip est un dispositif médical.

Version: 01/05/2024