

000/0060.050/20



## Coohy-tex, pansement Hydrogel (10cm x 10cm)

Coohy-tex est un pansement Hydrogel riche en eau pour soigner les écorchures et la peau échauffée. Coohy-tex refroidit la peau échauffée, adoucit la douleur et protège contre des infections.



### Propriétés


- Dimensions: 10 x 10 cm.
- Pansement Hydrogel riche en eau.
- Coohy-tex refroidit la peau et calme la douleur.
- Ne colle pas à la plaie.
- Protège la plaie contre les infections et les dégradations éventuelles .
- Diminue les cicatrices.
- S'adapte parfaitement aux formes du corps.
- Peut être enlever sans douleur.
- Anti-allergène. Biodégradable.

### Applications

- Soin temporaire des écorchures mineures, brûlures du premier degré, peau échauffée ou déshydratée.

### Utilisation

Ouvrir l'emballage et sortir le pansement Hydrogel. Saisir la fibre-filet et la sortir du moule. Appliquer le pansement Hydrogel sur la plaie avec la fibre-filet par dessus, éloigner le film et fixer avec un bandage. Consulter un médecin. Le pansement Hydrogel peut rester sur la plaie jusqu'à 12 heures.

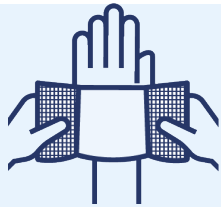

## Contenu

- Pièce.

## Préservation

Emballé individuellement dans un emballage de polyamide-polyéthylène. Conserver dans un endroit sec entre 0°C et 25°C. Date d'expiration: 5 ans après la date de fabrication.

Coohy-tex est un dispositif médical.

**Version: 12/08/2026**