

000/0080.011/20



Cold/Hot pack

Le Cold/Hot pack est une vessie à glace ainsi qu'une source de chaleur réutilisable qu'on peut utiliser dans chaque situation où la thermothérapie est nécessaire.

Propriétés

- Dimensions: 11 x 29 cm.
- Effets du Cold pack: local, analgésique, anti-oedémateux, anti-inflammatoire.
- Effets du Hot pack: local, décontractant, stimule l'activité sanguine.
- Housse avec élastique : la compresse reste sur place!
- Réutilisable.

Utilisation

APPLICATION FROIDE

- Déposer 2 heures au congélateur. Envelopper d'un linge.

APPLICATION CHAUDE

- Chauffer environ 5 minutes dans de l'eau à 80°C maximum ou placer dans le four à micro-ondes pendant 1 minute maximum (puissance 650 W). Envelopper d'un linge.

Contenu

- Boîte 6 pièces.

Préservation

- Froid: à conserver dans le congélateur.
- Chaud: à conserver à température ambiante.
- Date d'expiration: 60 mois après la date de fabrication.
- Produit individuel: voir emballage.

Le Cold/Hot pack est un dispositif médical.

