

000/0080.030/20

Inicspray, spray glacière synthétique




L'Inicspray est une bombe de froid intense synthétique qui permet au blessé de reprendre le travail ou l'activité sportive aussi vite que possible.

Propriétés

- Contenu: 200 ml.
- L'effet-froid synthétique de l'Inicspray neutralise la douleur provoquée par des chutes graves ou collisions.

Utilisation

- Tenir le spray à une distance de 20 cm.
- Vaporiser directement sur la zone à traiter (et pas sur les vêtements).
- Vaporiser avec un mouvement de balayage afin d'éviter tout risque de gelures.
- Continuer jusqu'à ce qu'une couche de poudre se forme sur la peau.
- Cette couche disparaît après quelques instant.
- Utiliser sur la peau saine.

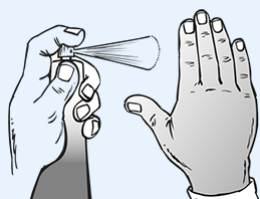

Contenu

- Pièce.

Préservation

- Date d'expiration: 60 mois après la date de fabrication.
- Produit individuel: voir emballage.

L'Inicspray est un dispositif médical.

Version: 12/08/2026

