

000/0090.065/00



Pince à tiques

Avec la pince à tiques, les tiques peuvent être retirées rapidement et sans danger.

Propriétés

- Dimensions: 10.3 x 2.9 cm.
- Réutilisable.
- Petite et légère.
- Avec capuchon protecteur et mode d'emploi.
- Multifonctionnelle: peut également être utilisée comme porte-clés.

Utilisation

- Prenez la pince à tiques et enlevez le capuchon.
- Placez le pouce et l'index de part et d'autre de la pince.
- Poussez avec le pouce afin d'ouvrir la pince.
- Pincez la tique au niveau de sa tête (pas du ventre) le plus près possible de la peau.
- Fermez la pince doucement et retirez-la en un mouvement rotatif.
- Vérifiez que la tique soit retirée complètement.
- Ne touchez pas la tique à mains nues.
- Nettoyez la peau autour de l'endroit de piqûre.

Contenu

- pièce

Préservation

- Conservation illimitée.

La pince à tiques est un dispositif médical.

Version: 29/04/2024