

000/0090.080/00

## MExT Insect Bite, pompe contre les piqûres d'insectes



La MExT Insect Bite est une pompe à vide simple d'utilisation pour aspirer rapidement et sans douleur le venin d'insectes (guêpes, moustiques, abeilles ...), d'araignées, poissons, méduses et de serpents. Atténue instantanément les douleurs, démangeaisons, gonflements et réactions allergiques.

### Propriétés

- Dimensions: 12 x 4.7 cm.
- Multifonctionnelle (guêpe, abeille, taon, araignée, tique, scorpion, serpent, méduse ...).
- Enlève les dards, le venin, la salive et les substances anti-coagulation des moustiques et des tiques.
- 750 millibars de force aspiratrice : exciser la plaie avec un scalpel ou un couteau n'est plus nécessaire.
- Réutilisable.
- Petite et légère.
- Utilisable de manière autonome. Embout transparent.

### Utilisation

- Choisissez l'embout transparent selon la dimension de la morsure et mettez-le sur la pompe.
- Tirez complètement le piston blanc et placez l'embout transparent sur la morsure.
- Poussez le piston pour aspirer le venin.
- Désinfectez la piqûre et nettoyez les embouts après chaque usage.

## Contenu

- Pièce.

## Préservation

- Conservation illimitée.

La MExT Insect Bite est un dispositif médical.

**Version: 12/08/2026**

