

000/0150.010/20



Masque de bouche-à-bouche

La MExT **masque bouche-à-bouche** permet une réanimation sûre et efficace. Grâce à la combinaison unique de filtres, le risque de contamination et d'infection est réduit à un minimum absolu.

Propriétés

- Dimensions: 20 x 20 cm.
- Le film protecteur protège du contact direct avec le sang, la peau et la salive.
- Le filtre spécial n'absorbe pas de liquides.
- Le système à valves assure une insufflation unidirectionnelle.
- Usage facile.
- Emballage compact.
- Mode d'emploi clair.
- Sans latex.

Utilisation

- Libérer les voies respiratoires en basculant la tête en arrière et en soulevant le menton.
- Introduire la valve entre les dents du patient.
- Fermer le nez du patient,
- Insuffler de l'air dans la valve et vérifier si la poitrine se soulève: deux fois.
- Alternier 30 massages cardiaques et 2 insufflations jusqu'à ce que la victime retrouve une respiration normale.



Préservation

- Conserver à une température sèche et fraîche.
- Date d'expiration: 5 ans date de fabrication.

- Produit individuel: voir emballage.
- Usage unique.

La masque de bouche-à-bouche est un dispositif médical.

Version: 19/05/2024

