

000/0020.024/30



Elwo Mix, assortiment de sparadraps adhésifs élastiques

Le sparadrap qui permet de continuer le travail librement

L'Elwo Mix est le pansement idéal pour n'importe quelle partie du corps. Les sparadraps élastiques offrent une sensibilité maximale aux bouts des doigts et aux plis. Diverses formes et dimensions.



Propriétés

- Elasticité élevée: permet de soigner facilement des endroits généralement difficiles à traiter; garantit une mobilité optimale lors de l'usage.
- Résiste à l'eau et à la graisse.
- Hypoallergénique grâce à l'adhésif en oxyde de zinc.
- Couleur neutre.
- Compresse anti-adhérente.
- Facile à appliquer.
- Emballé individuellement.
- Boîte de distribution pratique.

Applications

- Coupures et écorchures.
- Usage unique.
- Ne convient pas pour les plaies profondes, infectées ou saignant fortement.
- Cinq modèles pour les petites surfaces, doigts, paumes, grandes surfaces, articulations des doigts et bouts des doigts.

Utilisation

- Bien désinfecter la plaie.
- Choisir le sparadrap approprié selon l'endroit et la taille de la plaie.
- Appliquer sur la peau sèche et bien presser.
- Remplacer le sparadrap quand il est mouillé.

Contenu

- Boîte de 70 pièces.
- 5 modèles: 20u. 4x4cm, 20u. 6x2cm, 6u. 10x5cm , 12u. H-forme, 12u. Papillon.

Préservation

- Date d'expiration: 36 mois après la date de production
- A conserver à température ambiante (entre 10 et 25°C) et dans un endroit sec et sombre.

Ce produit est un dispositif médical de classe I portant le marquage CE.

Version: 27/04/2024