

000/0020.037/30



Elwo bleu Mix, sparadraps élastiques et métalliques détectables

Grâce à la couleur bleue et la bande métallique détectable, on utilise l'assortiment Elwo bleu Mix, sparadraps métalliques détectables surtout dans l'industrie alimentaire. Un mix de formes et de dimensions. 70 pièces.



Propriétés

- Couleur bleue.
- Métal détectable. Si, pendant le processus de production, un sparadraps est tombé dans le produit, on peut le détecter à l'aide d'un appareil de détection grâce à la présence d'un film d'aluminium sous la compresse et de ce fait l'enlever.
- Résiste à l'eau et à la graisse.
- Hypoallergénique grâce à l'adhésif en oxyde de zinc.
- Elasticité élevée: permet de soigner facilement des endroits généralement difficiles à traiter; garantit une mobilité optimale lors de l'usage.
- Facile à appliquer.
- Emballé individuellement dans une boîte à compartiments individuels par type de produit.

Applications

- Coupures et écorchures.
- Ne convient pas pour les plaies profondes, infectées ou saignant fortement.
- Peut être utilisé dans l'industrie agroalimentaire.
- Cinq modèles : 4x4 cm : petites surfaces; 6x2 cm : doigts, paumes etc.; 'Jumbo' 10x5 cm : grandes surfaces; 'Anchor' (forme H) : articulations des doigts – 7,5 x 4 cm; 'Butterfly'

(Papillon) : bout des doigts – 7,5 x 4 cm.

- Usage unique.

Utilisation

- Désinfecter la blessure.
- Choisir le sparadrap approprié selon la place et la taille de la blessure.
- Appliquer sur une peau sèche et propre et bien presser.
- Remplacer le sparadrap quand il est mouillé.



Contenu

- Boîte 70 pièces.
- 20 pc - 4 x 4 cm, 20 pc - 6 x 2 cm, 6 pc - 10 x 5 cm, 12 pc - H, 12 pc - papillon.

Préservation

- Date d'expiration: 36 mois après la date de production
- A conserver à température ambiante (entre 10 et 25°C) et dans un endroit sec et sombre.

Ce produit est un dispositif médical de classe I portant le marquage CE.

Version: 12/08/2026