



000/0020.081/20

Cutastrip, sutures cutanées

Le Cutastrip est une bande à suture élastique. Sans adjonction de fils de renfort.



Propriétés


- Dimensions: 75 x 6 mm.
- Application facile et rapide.
- Soulagement des bords de la plaie de petites blessures.
- Emballage pratique de 5 pouches (3 bandes par pouch).
- Hygiénique: emballage individuel.

Applications

- Fermeture des plaies superficielles, il n'y a pas de marques de points de suture.
- Support supplémentaire (en combinaison avec des fils de renfort/agraves).
- Usage unique.

Utilisation

- Après nettoyage de la blessure et de ses bords, bien mettre la première moitié de la bande perpendiculairement aux bords de la plaie.
- Ensuite, assembler les bords de la plaie et coller la deuxième moitié de la bande.
- Appliquer les bandes suivantes de la même façon, espacées de ± 3 mm.

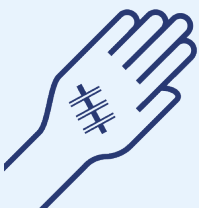

Contenu

5 x 3 sutures

Préservation

- Date d'expiration: 48 mois après la date de production
- A conserver à température ambiante (entre 10 et 25°C) et dans un endroit sec et sombre.

Ce produit est un dispositif médical de classe I portant le marquage CE.

Version: 29/04/2024