

000/0020.102/20

Dr. Pino Mix, assortiment de sparadraps enfants

Avec tattoo Dr. Pino dans chaque boîte.



Dr. Pino Mix, sparadrap non-tissé pour les petites et grandes chutes. Diverses formes et dimensions. 40 unités.



Propriétés


- Blanc, avec motifs enfants.
- Sparadrap non-tissé.
- Laisse respirer la peau.
- Compresse antiadhérente.
- Doux pour la peau.
- S'enlève sans douleur.
- Emballage individuel.
- Boîte facile à utiliser avec des compartiments séparés pour les 4 formes.

Applications

- Coupures et écorchures superficielles de la peau sensible.
- Ne convient pas aux plaies saignant fortement, aux plaies ouvertes, profondes ou infectées.
- Usage unique.

Utilisation

- Désinfectez la blessure.
- Choisissez le sparadrap approprié en fonction de la taille et l'endroit de la plaie.
- Appliquez sur peau sèche et propre. Pressez bien.
- Remplacez le sparadrap quand il est mouillé.

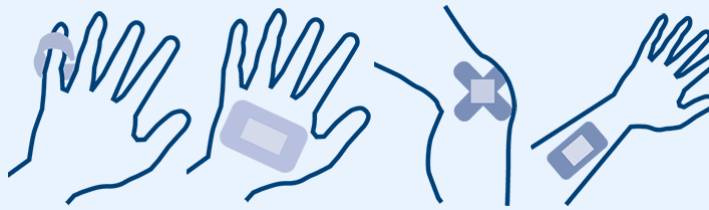

Contenu

- Boîte 40 unités.
- 16u. (7.2 x 2 cm), 14u. (6 x 3.8 cm), 5u. (10 x 5 cm), 5u. Croix.

Préservation

- Date d'expiration: 48 mois après la date de production.
- A conserver à température ambiante (entre 10 et 25°C) et dans un endroit sec et sombre.

Ce produit est un dispositif médical de classe I portant le marquage CE.

Version: 15/05/2024