



000/0020.110/20

Duoskin+, sparadrap imperméable

Duoskin+ est un sparadrap autocollant avec film transparent en polyuréthane.



Propriétés

- Dimensions: 7 x 2 cm.
- Compresse antiadhérente.
- Film transparent souple et respirant, composé de polyuréthane.
- Ne laisse pas passer l'eau ni les bactéries.
- Hypoallergénique.

Applications

- Recouvrir et protéger des plaies peu exsudatives.
- Usage unique.

Utilisation

- Enlevez les papiers protecteurs et appliquez le sparadrap sur une peau sèche et propre.
- Serrez bien autour de la blessure.
- On peut enlever le sparadrap en détachant un coin.
- Ensuite, étirez le sparadrap parallèlement à la peau.

Contenu

Boîte (12 pcs)

Préservation

- Date d'expiration: 59 mois après la date de production
- A conserver à température ambiante (entre 10 et 25°C) et dans un endroit sec et sombre.

Ce produit est un dispositif médical de classe I portant le marquage CE.

Version: 12/08/2026