



000/0020.112/30

# Duoskin+ PRO, pansement imperméable avec Alginate

Duoskin+ PRO est un pansement transparent et antiadhérent. La compresse antiadhérente est imprégnée de l'alginate hémostatique.



## Propriétés

- Dimensions: 6 x 8 cm.
- Extrait d'algue marine avec action hémostatique.
- Résistant à la poussière, à l'eau, à la graisse et à l'huile.
- Peut être utilisé sur des coupures, des crevasses et des blessures superficielles (après les avoir soignées convenablement).
- Laisse respirer la peau. Imperméable aux bactéries.
- Compresse absorbante, antiadhérente.
- Caractéristique collante importante.
- Hypoallergénique.
- Film dermique transparent.

## Applications

- Coupures.
- Blessures suturées.
- Ecorchures.

## Utilisation

Application du pansement

- Nettoyer d'abord la blessure.
- Ouvrir l'emballage.
- Enlever l'ailette de protection '1'.
- Appliquer le pansement de sorte que la blessure soit entièrement couverte.
- Enlever l'ailette de protection '2'.
- Exercer une légère pression sur toute la surface afin de faire adhérer le pansement.
- Ôter l'ailette de protection supérieure en levant la languette bleue.
- Serrer fermement autour de la blessure.

#### Retrait du pansement

- On peut enlever le pansement en détachant un coin.
- Ensuite, retirer le pansement parallèlement à la peau.



## Contenu

- Boîte (30 pcs).

## Préservation

- Conserver à température ambiante et dans un endroit sec.
- Ce pansement est emballé individuellement.
- Date d'expiration : 59 mois après la date de fabrication.
- Produit individuel : voir emballage.

Duoskin+ PRO est un dispositif médical.

**Version: 18/05/2024**