

000/0010.012/20



VFMK Propolis, pansement autoadhésif pour doigts

modèle distributeur pratique

VFMK Propolis est un **pansement pour doigts** pour soigner les petites blessures courantes rapidement et de façon hygiénique.



Propriétés

- Pansement autoadhésif en rouleau.
- Couleur: blanc.
- Déchirable à la main.
- Ne colle ni à la peau, ni aux poils, ni à la plaie.
- Continue à coller après contact avec de l'eau.
- Laisse respirer la peau.
- Le Propolis a une fonction antibactérienne et anti-inflammatoire.
- Contient du latex (peut provoquer des réactions allergiques).


Applications

- Pansement pour doigts.
- Pour soigner des blessures peu exsudatives.
- Peut aussi être utilisé comme compresse.
- Usage unique.

Utilisation

- Déchirer 10 à 15 cm du pansement.

- Enlever le papier protecteur.
- Appliquer sur une peau sèche et propre.
- Enrouler autour du doigt et bien presser.
- Pour utiliser comme compresse: plier sur plusieurs couches, appliquer sur la blessure et fixer.
- Remplacer le pansement quand il est mouillé.

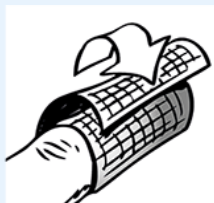

Contenu

Boîte distributrice 2 rouleaux.

Préservation

- Le pansement VFMK Propolis est emballé individuellement sous cellophane.
- Date d'expiration: 36 mois après la date de production.
- A conserver à température ambiante (entre 10 et 25°C) et dans un endroit sec et frais.

Ce produit est un dispositif médical de classe I portant le marquage CE.

Version: 07/05/2024