

000/0060.043/30



Coohy, compresse en Hydrogel refroidissante

Coohy est une compresse en Hydrogel non adhérente et riche en eau avec un effet de refroidissement durable.



Propriétés

- Compresse en Hydrogel stérile et non adhérente. Contient jusqu'à 70% d'eau.
- L'Hydrogel apporte de l'humidité aux tissus dévitalisés et absorbe l'exsudat excédentaire de la plaie. Ainsi, on crée un 'microclimat', stimulant une guérison de la blessure: la combinaison de l'Hydrogel, du suintement de la plaie et du manque d'oxygène crée un milieu humide, ce qui fait que la peau se rétablit plus vite. Peut favoriser l'angiogenèse.
- L'Hydrogel a un effet antidouleur et apaisant (plus de croûtes dures) et minimise la douleur lorsque le pansement est changé. Il n'y a plus de particules qui restent dans la blessure.
- La partie supérieure de la compresse est recouverte d'un film inamovible qui ralentit le processus d'évaporation.
- Coohy reste froid au toucher pour les raisons suivantes:
 - à cause de l'écart de température entre le gel (température ambiante) et la peau (échauffée);
 - L'eau dans le gel a une capacité d'échauffement, c'est-à-dire, le gel a besoin d'énergie thermique pour faire monter la température afin d'atteindre la température du corps;
 - Même lorsque le gel a pris la même température que la peau, l'eau qu'il contient peut

s'évaporer. Là encore, l'évaporation nécessite de l'énergie thermique et cette énergie est extraite de la peau, ce qui a pour effet de la refroidir.

- Semi-transparent: idéal pour contrôler la blessure.

Applications

- Pour soigner la peau échauffée et les plaies peu exsudatives.
- Ne convient pas pour des plaies profondes ou infectées, ni pour des plaies saignant fortement.

Utilisation

APPLIQUER

- Sortir la compresse stérile de l'emballage.
- Décoller la moitié de l'insert en plastique blanc, la positionner sur la plaie ou la peau, la lisser en place et détacher la moitié restante.
- Pour traiter les plaies plus étendues, plusieurs compresses peuvent être utilisées côte à côte.
- Fixer avec un pansement secondaire approprié, un bandage, du ruban adhésif ou un système de compression adapté, le cas échéant.

RETIRER

- Enlever le pansement en détachant un coin. Etirer le pansement parallèlement à la peau.
- Si nécessaire, la compresse peut être trempée dans un sérum physiologique pour la réhydrater d'abord, puis détachée comme décrit à l'étape 1.

CHANGER

- Lorsque les exsudats de plaie sont excessifs, Coohy doit être remplacé en temps opportun.
- S'il y a moins ou peu d'exsudats, Coohy peut être changé tous les 2 à 3 jours jusqu'à ce que la plaie cicatrise.

Contenu

Boîte 12 pièces

Préservation

- Conserver au frais et au sec à température ambiante.
- Date d'expiration: 36 mois DOM.

Ce produit est un dispositif médical classe I stérile, approuvé CE0123.

Version: 29/09/2026

