

000/0050.051/30

Silvera, spray au chlorure d'argent et à l'aloe vera

Silvera est une solution saline stérile en spray au chlorure d'argent et à l'aloe vera. Nettoyant, apaisant et réparateur.



Propriétés

- Spray isotonique stérile à basse pression pour le nettoyage complet de la peau endommagée et des muqueuses.
- Le nettoyage est réalisé grâce à la présence d'une substance tensioactive légère et à l'action mécanique du spray, sans endommager les tissus nouvellement formés.
- A une action préventive sur l'éruption cutanée due à la chaleur, l'inflammation en/ou l'irritation de la peau, également causées par les couches-culottes.
- La teneur en chlorure d'argent permet de contrôler le microenvironnement de la plaie.
- Ne contient pas de dérivés de tissus animaux.
- Incolore et inodore.
- Fabriqué en Europe.

Applications

Pour le nettoyage des lésions cutanées, des plaies, des abrasions, des brûlures, des cloques, des érythèmes, des piqûres de méduses et d'insectes.

Utilisation

Vaporiser la solution directement sur la zone à traiter. Éliminer les impuretés avec une compresse stérile. Si nécessaire, répéter le traitement 2 à 3 fois par jour. Essuyer la buse après chaque utilisation. Répéter le traitement avant chaque application d'un pansement. Ne pas tenir le spray à l'horizontale pour vaporiser.

Contenu

Vaporisateur 125 ml

Préservation

- Conserver le récipient bien fermé à température ambiante et dans un endroit bien ventilé.
- Durée de conservation: 3 ans à partir de la date de fabrication.

Ce produit est un dispositif médical de classe IIa homologué CE 0373.

Version: 12/08/2026