

000/0140.011/30



Bloodstop, bouchon de saignement avec alginate et calendula

Bloodstop, spray pour arrêter les saignements dus à des blessures superficielles mineures.



Propriétés

- Spray pour les soins des plaies.
- Le spray forme une couche de poussière qui coagule et absorbe le sang pour former un hydrogel. L'hydrogel protège la plaie contre les facteurs environnementaux nocifs.
- Contient des extraits naturels de plantes aux propriétés médicinales: Alginate, Calendula, Camomille et Argousier. Ils adoucissent, hydratent et favorisent le processus de guérison naturel.
- Couleur orange
- Convient aux personnes diabétiques


Utilisation

Secouer la bombe aérosol vigoureusement avant l'utilisation. Pendant la pulvérisation, maintenez le récipient à la verticale et appliquez la substance en pressant le pulvérisateur à une distance de 15 à 20 cm de la surface du corps.

Laisser sécher.

Répétez l'injection jusqu'à ce que le saignement cesse. La couche d'hydrogel se résorbe d'elle-même.

La plaie séchée peut être recouverte d'un pansement respirant. Peut provoquer une sensation de brûlure au premier contact.

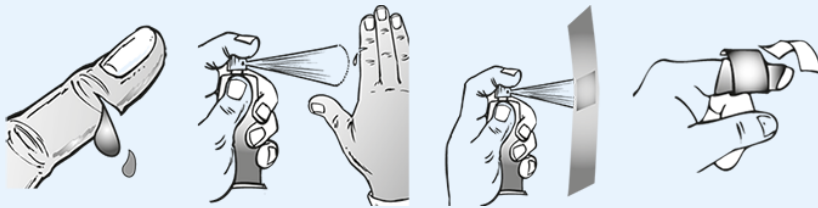

Contenu

Vaporisateur

Préserveration

- Conserver à température ambiante et dans un endroit sec.
- Date d'expiration: 24 mois après la date de production.

Ce produit est un dispositif médical , class IIa homologué CE1023.

Version: 12/08/2026