000/2000.010/00



## Brancard cuillère

Le brancard cuillère est employé de préférence pour transporter des patients pour lesquels le déplacement implique certains risques.

## **Propriétés**

• Dimensions: 210 x 44 cm.

• Le brancard est réglable dans la longueur.

• Le système de blocage empêche le patient de glisser lors du transport.

Longueur minimale : 168 cm.Longueur maximale : 210 cm.

Plié: 120 cm.Largeur: 44 cm.Epaisseur: 6 cm.

• Epaisseur repliée : 9 cm.

• Poids:10,2 kg.

• Force portative : 159 kg.

• Ceintures : 2 (à fermeture quick release).

• CE approuvé.

## **Utilisation**

- Débloquer les fermetures latérales jaunes du brancard et ajuster la longueur du brancard.
- Rebloquer les fermetures latérales.
- En appuyant sur les boutons aux bouts du brancard, le brancard s'ouvre comme un compas en deux parties. Ainsi on peut glisser les "pelles" sous le patient.
- Pour refermer le brancard, il suffit de mettre les deux parties ensemble et d'appuyer. Le brancard se ferme automatiquement.

## Contenu

• Pièce.

Le brancard cuillère est un dispositif médical.

Version: 07/05/2024