

000/2000.040/00



Brancard vacuüm

Le matelas vacuüm garantit une immobilisation rapide, efficace et confortable et prend la forme du corps du patient. Ainsi, la colonne vertébrale est protégée parfaitement et de façon confortable.

Propriétés

- Dimensions: 210 x 110 cm.
- Poids : 6,8 kg.
- Prend la forme du patient.
- 3 sangles de blocage.
- Bonne tenue au froid (ne durcit pas).
- Souple.
- Radiotransparent.
- 10 poignées.
- Immobilisation rapide et efficace.
- Entretien facile
- lavable
- CE approuvé.

Utilisation

- Répartir les microbilles sur la totalité du matelas.
- Positionner le patient sur le matelas.
- Fermer les sangles.
- Attacher la pompe au matelas et gonfler jusqu'à ce que ce dernier devienne dur.
- Fixer fermement les sangles.
- Pour relâcher : Détacher les sangles.
- Pousser sur la valve (+/- 20 secondes) jusqu'à ce que le matelas redevienne souple.

Contenu

- Pièce.

Préservation

- Le matelas et les sangles peuvent être facilement nettoyés avec de l'eau, du savon, un détergent doux et/ou un désinfectant.
- Toujours rincer abondamment avec de l'eau propre froide.
- Le bouchon rouge de sécurité sur la valve MaxiValve doit être bien fermé chez chaque type de nettoyage.
- Une solution d'hypochlorite de sodium (eau de Javel) peut également être utilisée. Toutefois, un contact prolongé entre la solution et la toile synthétique doit être évité (risque de décoloration).
- Une solution javellisée de 2 à 10% peut également être utilisée pour nettoyer le matelas.
- Le matelas doit être complètement sec avant de le ranger dans le sac de rangement.
- Il faut vérifier s'il n'y a pas de petits trous dans le matelas avant et après chaque usage. Des fuites ou crevaisons de moins de 3 mm peuvent être réparées à l'aide du kit de réparation fourni avec le matelas.

Le brancard vacuüm est un dispositif médical.

Version: 06/05/2024