

000/0030.031/12



Pansement compressif stérile (8 cm x 10 cm)

Le pansement compressif stérile est un bandage de protection avec compresse absorbante. Il protège et permet une fixation efficace pour des blessures au doigt, à la main, au pied ou à la jambe.

Propriétés

- Pansement élastique.
- Compresse antiadhérente.
- Grand pouvoir absorbant.

Utilisation

- Désinfecter la blessure.
- Mettre la compresse sur la blessure.
- Enrouler le pansement autour du bras, de la main, du pied ou de la jambe. Assembler les extrémités du pansement.
- Pour arriver à un pouvoir absorbant plus élevé, on peut mettre de l'ouate hydrophile sur la compresse.



Préservation

- Date d'expiration: 60 mois après la date de production à température ambiante.
- Produit individuel: voir emballage.

Le pansement compressif stérile est un dispositif médical.

Version: 12/08/2026