

000/2100.010/00



Vacuümspalkenset

De Vacuümspalkenset bieden een comfortabele oplossing voor haast alle breuken of verstuikingen, gaande van ontwrichte schouders tot haakse handbreuken.

Eigenschappen

- Large: 102 x 76 x 2,5 cm.
- Medium: 70 x 51 x 2,5 cm.
- Small: 50 x 33 x 2,5 cm.
- Opgeborgen: 61 x 28 x 28 cm.
- Gewicht: 2.9 kg.
- Temperatuur: -34°C tot 82°C.
- Neemt de vorm aan van het gebroken of ontwrichte ledemaat.
- Thermische isolatie.
- Waterbestendig.
- X-stralen doorlaatbaar.
- Velcro riemen.
- Immobiliseert in 30 seconden.
- Easy-click pompsysteem.
- 1 jaar garantie.
- CE-goedgekeurd.
- NSN (goedgekeurd door US Defence Medical Standardization Board).

Gebruik

- Verdeel de korrels gelijkmatig over de spalk.
- Wikkel de spalk rond de ontwrichte of gebroken ledemaat.
- Maak lichtjes vast met de riemen.
- Klik de pomp vast op het ventiel.
- Pomp de lucht uit de spalk (+/- 20 seconden) tot de spalk keihard wordt.
- Maak de riemen stevig vast.
- Om te lossen: Maak de riemen los.
- Duw een tiental seconden op het ventiel tot de spalk weer soepel wordt.

Inhoud

- Set 3 stuks.

Bewaring

- 10 jaar houdbaar.
- Niet blootstellen aan extreme hitte.

De vacuümspalkenset bestaat uit medische hulpmiddelen.

Versie: 05/05/2024

