

000/2100.101/00



Stifneck - 4 in 1


De Stifneck Select is een eenvoudige oplossing om tijdelijk de hals te fixeren van een patiënt met risico op halswervelbreuk. De Stifneck select kan gebruikt worden voor ieder halstype (geen-nek, kort, standaard, lang).

Eigenschappen

- Afmetingen: 55 x 15 cm.
- Plastiek PVC.
- Schokabsorberende foamlaag.
- Velcro strips.

Gebruik

- Meet de hoogte van de nek (tussen de schouder en de onderkant van de kin).
- Stel de Stifneck in op de gewenste grootte door aan de ondersteuningsband te trekken.
- Blokkeer de Stifneck op de gewenste grootte. Modelleer de schokabsorberende schuimlaag.
- Plaats de Stifneck rond de hals van de patiënt volgens de instructietekeningen.
- Breng de patiënt naar het ziekenhuis of waarschuw de nodige instanties.

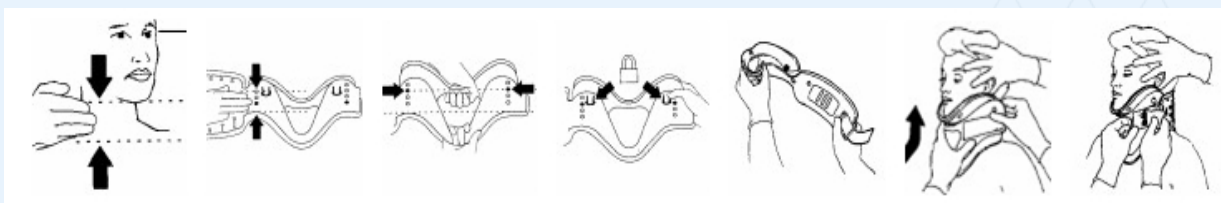

Inhoud

- Stuk.

Bewaring

- Het wordt aangeraden om de Stifneck Select slechts éénmalig te gebruiken.

De Stifneck select is een medisch hulpmiddel.

Versie: 28/04/2024

