

000/0020.037/30



Elwo blauw Mix, elastische, metaaldetecteerbare pleisters

Elwo blauw Mix, metaaldetecteerbare pleisters, worden omwille van hun blauwe kleur en hun metaaldetectiestrip vooral gebruikt in de voedingsindustrie. Een mix van vormen en afmetingen. 70 stuks.



Eigenschappen

- Blauwe kleur.
- Metaaldetecteerbaar. Indien een pleister tijdens het productieproces in het product terechtgekomen is, kan deze dankzij de aluminiumstrip onder het wondkussen opgespoord worden door een professioneel detectietoestel en zo verwijderd worden.
- Water- en vetbestendig.
- Hypoallergeen dankzij kleefstof met zinkoxide.
- Sterk elastisch: gemakkelijk en overal aan te brengen; garandeert vlotte beweeglijkheid tijdens gebruik.
- Niet-inklevend wondkussen.
- Eenvoudig aan te brengen.
- Individueel verpakt in een handige verdeeldoos met afzonderlijke compartimentering per product.

Toepassingen

- Snij- en schaafwonden.
- Geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.
- Niet geschikt voor sterk bloedende, diepe of geïnfecteerde wonden.
- Vijf modellen: 4x4 cm: kleine oppervlakten, 6x2 cm: vingers, handpalmen etc., 'Jumbo' 10x5

cm: grote oppervlakten, 'Anchor' (H-tjes): knokkel – 7,5x4 cm, 'Butterfly' (Vlindertjes): vingertop – 7,5x4 cm.

- Eenmalig gebruik.

Gebruik

- De wond goed ontsmetten.
- Kies het soort pleister afhankelijk van de locatie en de grootte van de wonde.
- Op droge, propere huid aanbrengen en goed aandrukken.
- Pleister vervangen, indien nat.



Inhoud

- Doos 70 stuks.
- 5 modellen: 20st 4x4cm, 20st 6x2cm, 6st 10x5cm, 12st H (knokkel), 12st Vlinder.

Bewaring

- Vervaldatum: 36 maanden na productiedatum.
- Bewaren op een koele, droge en donkere plaats, tussen 10 en 25°C.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel. CE approved.

Versie: 26/07/2026