

000/0020.123/30



Hydroskin Metaldetect, blauwe, waterdichte Hydrogelpleister

Hydroskin Metaldetect wordt door zijn blauwe kleur en metaaldetecteerbare strip vooral gebruikt in de voedingsindustrie.



Eigenschappen

- Afmetingen: 7.5 x 4.5 cm.
- Niet-inklevend Hydrogelverband dat overtollig huidvocht licht absorbeert.
- Ondoorlaatbaar voor water.
- Schokabsorberend.
- Blauwe, soepele polyurethaanfilm waardoor de huid kan ademen en bacteriën worden tegengehouden.
- Zorgt voor een vochtige wondomgeving.
- Metaaldetecteerbare strip onder het wondkussen met Hydrogel. Indien een Hydroskin Metaldetect tijdens het productieproces in het product terechtgekomen is, kan dit dankzij de metaalstrip opgespoord worden door een professioneel detectietoestel en pijnloos verwijderd worden.
- Individueel verpakt.

Toepassingen

- Eenmalig gebruik.
- Ter verzorging van oppervlakkige snij- en schaafwonden.
- Niet geschikt voor sterk bloedende, open, diepe of geïnfecteerde wonden.
- Geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.

Gebruik

- Reinig eerst de wond.
- Maak de verpakking open.
- Verwijder het eerste deel van het witte schutblad.
- Bevestig de pleister op de wond.
- Verwijder het tweede deel van het witte schutblad.
- Druk de pleister rond de wond goed aan.
- Verwijder nu de bovenste schutbladen.
- Controleer de wond regelmatig en vervang de pleister indien nodig.
- De pleister kan verwijderd worden door deze aan één hoek los te maken en evenwijdig met de huid uit te rekken.



Inhoud

40 stuks

Bewaring

- Vervaldatum: 36 maanden na productiedatum.
- Bewaren op een koele, droge en donkere plaats, tussen 10 en 25°C.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel. CE approved.

Versie: 02/05/2024