



000/0020.124/20

Hydroskin, waterdichte wondpleister met Hydrogel

Hydroskin is een zelfklevende tweedehuidspleister met Hydrogel.



Eigenschappen

- Afmetingen: 7.5 x 4.5 cm ovaal.
- Niet-inklevend Hydrogelkompres (bevat 30% water) dat overtollig huidvocht licht absorbeert.
- Transparante polyurethaanfilm waardoor de wond kan ademen en bacteriën worden tegengehouden.
- Zorgt voor een vochtige wondomgeving.
- Hypoallergeen.
- Pijnloos verwijderbaar.

Toepassingen

- Oppervlakkige snij- en schaafwonden.
- Blaren.
- Niet geschikt voor sterk bloedende, open, diepe of geïnfecteerde wonden.
- Eenmalig gebruik.

Gebruik

- Breng aan op droge, propere huid.
- Volg de nummering.
- Zorg voor een effen kleebrand.
- Controleer de wond regelmatig en vervang de pleister indien nodig.
- Blaren: de pleister pas verwijderen als deze vanzelf loslaat.



Inhoud

doosje 24 stuks

Bewaring

- Vervaldatum: 36 maanden na productiedatum.
- Bewaren op een koele, droge en donkere plaats, tussen 10 en 25°C.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel. CE approved.

Versie: 29/04/2024