

000/0060.050/20



Coohy-tex, Hydrogelverband (10cm x 10cm)

Coohy-tex is een niet-inklevend, waterrijk Hydrogelverband ter verzorging van schaafwonden en verhitte huid. Coohy-tex koelt de verhitte huid, verzacht de pijn en beschermt tegen infecties.



Eigenschappen

- Afmetingen: 10 x 10 cm.
- Waterrijk hydrogelverband.
- Coohy-tex koelt de verhitte huid en verzacht de pijn.
- Kleeft niet in de wonde.
- Beschermt de wonde tegen infecties en uitdroging.
- Vermindert littekenvorming.
- Past zich perfect aan de lichaamsvorm aan.
- Pijnloos verwijderbaar.
- Anti-allergeen.
- Biologisch afbreekbaar.


Toepassingen

- Tijdelijke verzorging van: Kleine schaaf- en snijwonden, eerstegraads-brandwonden, verhitte, uitgedroogde huid.

Gebruik

- Open de verpakking.
- Neem het textiel vast om het Hydrogelverband uit de vorm te halen.
- Leg het Hydrogelverband op de wonde met de textielkant naar boven, verwijder de folie en fixeer met een verband.

- Consulteer een arts.
- Het Hydrogelverband max.
- 12 uur op de wonde laten.

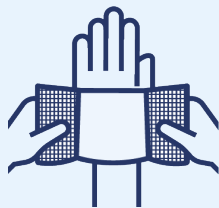

Inhoud

- Stuk.

Bewaring

- Verpakt in een individuele polyamide-polyethylene aluminiumverpakking.
- Op een droge plaats bewaren tussen 0°C en 25°C.
- Vervaldatum: 5 jaar vanaf productiedatum.

Coohy-tex is een medisch hulpmiddel.

Versie: 03/05/2024