

000/0060.051/20



Coohy-tex, Hydrogelverband (20cm x 40cm)

Coohy-tex is een niet-inklevend, waterrijk Hydrogelverband ter verzorging van schaafwonden en verhitte huid. Coohy-tex koelt de verhitte huid, verzacht de pijn en beschermt tegen infecties.



Eigenschappen


Afmetingen: 20 x 40 cm. Waterrijk hydrogelverband. Coohy-tex koelt de verhitte huid en verzacht de pijn. Kleeft niet in de wonde. Beschermst de wonde tegen infecties en uitdroging. Vermindert littekenvorming. Past zich perfect aan de lichaamsvorm aan. Pijnloos verwijderbaar. Anti-allergeen. Biologisch afbreekbaar.

Toepassingen

Tijdelijke verzorging van: kleine schaaf- en snijwonden, eerstegraads-brandwonden, verhitte, uitgedroogde huid.

Gebruik

Open de verpakking. Neem het textiel vast om het Hydrogelverband uit de vorm te halen. Leg het Hydrogelverband op de wond met de textielkant naar boven, verwijder de folie en fixeer met een verband. Consulteer een arts. Het Hydrogelverband max. 12 uur op de wonde laten.

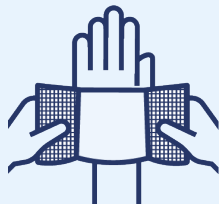

Inhoud

Stuk.

Bewaring

Verpakt in een individuele polyamide-polyethylene aluminiumverpakking. Op een droge plaats

bewaren tussen 0°C en 25°C. Vervaldatum: 5 jaar vanaf productiedatum.
Coohy-tex is een medisch hulpmiddel.

Versie: 29/09/2026

