

000/0070.020/20

## Ycla Spray, wond- en oogspray (50ml)



Ycla Spray, een zachte en doeltreffende zoutoplossing als eerste hulp bij stofjes in de ogen en bij kleine snij- en schaafwonden. Helpt het risico op verdere infectie te verminderen. 0.9% Natriumchloride-oplossing.

### Eigenschappen

- Inhoud: 50 ml.
- Spoelt veilig, precies en doeltreffend.
- Snel en makkelijk met één hand te gebruiken.
- Hypoallergeen en zonder bewaarmiddelen.
- Prikt niet.
- Sterk genoeg om vuiltjes uit wonden te spoelen, voldoende zacht om in de ogen te sprayen.
- Bag-in-can-systeem: een slim-ontwikkelde spuitbus die niet alleen uit elke mogelijke hoek gebruikt kan worden, maar die ook nooit druk verliest. Hierdoor is de spray bruikbaar tot de laatste druppel.
- Spraytijd: ? 15min.

### Toepassingen

wond- en oogspray voor het uitspoelen van vreemde deeltjes

### Gebruik

- Spraykop reinigen vóór gebruik door kort in de lucht te sprayen.

- Sprayen vanop 10cm afstand van het oog / de wonde.
- De spray kan gebruikt worden vanuit elke gewenste hoek.
- Direct contact met het oog / de wonde vermijden.

## Inhoud

- Flacon.

## Bewaring

- Op kamertemperatuur bewaren (10°C-30°C).
- Vervaldatum: 3 jaar na productiedatum.

Ycla Spray is een medisch hulpmiddel.

**Versie: 29/06/2026**