

000/0080.011/20



Cold/Hot pack

De Cold/Hot pack is een herbruikbare ijszak en warmtebron, overal bruikbaar wanneer thermotherapie noodzakelijk is.

Eigenschappen

- Afmetingen: 11 x 29 cm.
- Cold pack: vermindert de pijn lokaal, reduceert zwelling en werkt ontstekingsremmend.
- Hot pack: stimuleert de doorbloeding en is spierontspannend.
- Geleverd met bijhorende hoes, inclusief elastiek: blijft gemakkelijk zitten!
- Herbruikbaar.

Gebruik

KOELING

- Het kompres 2 uur in de vriezer leggen en daarna het kompres in een doek wikkelen.

WARMTEBEHANDELING

- Circa 5 minuten in maximaal 80°C heet water leggen of max.
- 1 min. in de microgolfoven plaatsen op 650 W en daarna het kompres in een doek wikkelen.

Inhoud

- Doos 6 stuks.

Bewaring

- Koud: bewaren in het vriesvak.
- Warm: op kamertemperatuur bewaren.
- Vervaldatum: 60 maanden na productiedatum.
- Individueel product: zie verpakking.

De Cold/Hot pack is een medisch hulpmiddel.

Versie: 03/05/2024

