

000/0080.030/20

# Inicspray, synthetische ijsspray



De Inicspray is een synthetische ijsspray die toelaat om het werk of de sportactiviteit snel te hervatten.




## Eigenschappen

- Inhoud: 200 ml.
- Het synthetische koude-effect van Inicspray neutraliseert de pijn na een gemene val of botsing.

## Gebruik

- De spray op 20 cm afstand houden.
- Rechtstreeks op de gekwetste plaats verstuiwen (en niet op de kledij eromheen).
- Verstuiwen in een golvende beweging om bevrozing te voorkomen.
- Blijven verstuiwen tot er zich op de huid een dunne poederlaag vormt.
- Na enkele ogenblikken verdwijnt deze poederlaag.
- Voor gebruik op een intacte huid.

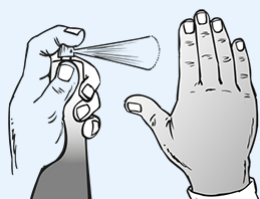

## Inhoud

Stuk.

## Bewaring

Vervaldatum: 60 maanden na productiedatum. Individueel product: zie verpakking.

Inicspray is een medisch hulpmiddel.

**Versie: 28/09/2026**