

000/0090.065/00



Tekenpincet

Met de MExT Tekenpincet kunnen teken moeiteloos en veilig verwijderd worden.

Eigenschappen

- Afmetingen: 10.3 x 2.9 cm.
- Herbruikbaar.
- Klein en licht.
- Ligt gemakkelijk in de hand.
- Incl. beschermdop & gebruiksaanwijzing.
- Multifunctioneel: kan ook als sleutelhanger gebruikt worden.

Gebruik

- Neem de tekenpincet en haal de dop eraf.
- Plaats uw duim bovenop en uw wijsvinger onderaan het tekenpincet.
- Duw met uw duim zodat de pincet opengaat.
- Plaats de pincet zo dicht mogelijk op de huid rond de kop van de teek.
- Sluit de pincet zachtjes en trek de teek met een draaiende beweging uit de huid.
- Controleer of de teek in zijn geheel verwijderd werd en raak de teek niet aan met de handen.
- Reinig de huid rond de plaats van de beet.

Inhoud

- Stuk.

Bewaring

- Onbeperkt houdbaar.

De tekenpincet is een medisch hulpmiddel.

Versie: 03/05/2024