

000/0090.070/30



Oogmagneet met loep



De oogmagneet/nylonlus met loep laat u toe om oppervlakkige onzuiverheden en (metaal)splinters uit het oog te verwijderen.

Eigenschappen

- Afmetingen: Lengte 145 mm (met uitgeschroefde lus/pen: 163 mm).
- Roestvrij staal.
- 1 Verstelbare glazen loep.
- 1 Magneetpen voor metalen deeltjes.
- 1 Nylonlus.
- Magneetpen en Nylonlus kunnen in het centrale deel in/uitgeschroefd worden.
- CE gekeurd.

Gebruik

- Schroef de nylonlus of magnetische pen uit de houder afhankelijk van het soort vuiltje dat uit het oog moet verwijderd worden.
- Zoek het deeltje in het oog met behulp van het vergrootglas.
- Gebruik de magneetpen voor metalen deeltjes.
- Gebruik de nylonlus voor andere stoffen.
- De nylonlus kan eveneens gebruikt worden om het deeltje te verplaatsen zodanig dat het gemakkelijk kan verwijderd worden met de magneetpen.
- Mag slechts gebruikt worden voor oppervlakkige vuiltjes in het oog.
- Niets forceren indien het vuiltje niet makkelijk meekomt. In dergelijke gevallen steeds een oogarts contacteren.
- Het is aan te raden om nadien het oog te spoelen met oogspoelmiddel.
- Gebruik eventueel een oogkompres. Raadpleeg een arts/oogarts.

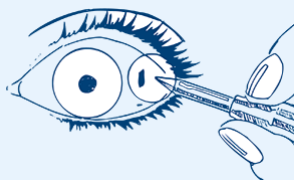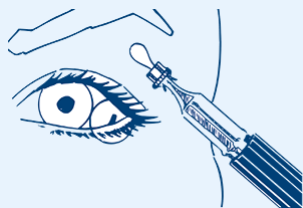

Inhoud

- Stuk

Bewaring

- Onbeperkt houdbaar mits de onderdelen intact zijn.
- Na gebruik reinigen met een ontsmettend middel en de gebruikte uiteinden terug in het centrale gedeelte schroeven.

De oogmagneet met loep is een medisch hulpmiddel.

Versie: 29/06/2026