

000/0090.080/00

MExT Insect Bite, pompje tegen insectenbeten



De MExT Insect Bite verwijdt moeiteloos geïnjecteerd gif van reptielen, kwallen, spinnen en insecten door een tijdelijk vacuüm te creëren boven op de beet. Hierdoor vermindert de pijn en de kans op allergische reacties op de beet.

Eigenschappen

- Afmetingen: 12 x 4.7 cm.
- Multifunctioneel (wesp, bij, daas, spin, teek, schorpioen, slang, kwal ...).
- Verwijdert angels, gif, speeksel en anti-stollingsstoffen van muggen en teken.
- 750 millibar zuigkracht: het uitsnijden van de wonde met een scalpel of mes is niet meer nodig.
- Herbruikbaar.
- Klein en licht.
- Autonoom bruikbaar.
- Transparante top.

Gebruik

- Kies een transparante kop volgens de grootte van de beet en plaats deze op de pomp.
- Trek het witte staafje volledig uit de houder.
- Plaats de transparante kop rond de beet.
- Duw het witte staafje naar beneden.
- Het gif wordt uit de beet gezogen.
- Ontsmet de beet en reinig de kopjes na elk gebruik.

Inhoud

- Stuk.

Bewaring

- Onbeperkt houdbaar.

De MExT Insect Bite is een medisch hulpmiddel.

Versie: 12/08/2026

