

000/0150.010/20



Reanimatieset

De MExT reanimatieset maakt veilig en efficiënt reanimeren mogelijk. De kans op besmetting en infecties wordt tot een minimum beperkt.

Eigenschappen

- Afmetingen: 20 x 20 cm.
- Het eenrichtingsventiel vermijdt direct contact tussen de hulpverlener en de patiënt.
- De speciale filter neemt geen vocht op.
- Het kleppensysteem zorgt ervoor dat de beademing slechts in één richting mogelijk is.
- Eenvoudig gebruik.
- Compacte verpakking.
- Duidelijke gebruiksaanwijzing.
- Zonder latex.

Gebruik

- Open de mond van het slachtoffer.
- Plaats het ventiel tussen de tanden van het slachtoffer.
- Knijp de neus van het slachtoffer dicht, blaas lucht in het ventiel en controleer of de borstkas omhoog komt: 2 keer.
- Geef afwisselend 30 hartmassages en 2 beademingen tot het slachtoffer terug normaal ademt.



Bewaring

- Koel en droog bewaren.
- Vervaldatum: 5 jaar na productiedatum.
- Individueel product: zie verpakking.
- Eenmalig gebruik.

De reanimatieset is een medisch hulpmiddel.

