

000/5160.403/30



Non-woven mondmasker 3-laags (doos 50st)

[MExT Protect mondmaskers bij de besten van de klas!](#)

Chirurgisch wegwerpmasker, 3-laags, non-woven met oorelastiek en aanpasbare neusclip.

Eigenschappen

- CE Medisch Hulpmiddel, klasse I niet steriel
- Conform standaard EN14683:2019+AC:2019. Biedt een zeer lage ademhalingsweerstand.
- Chirurgisch masker type IIR, bacteriële filterefficiëntie (BFE) $\geq 98\%$
- Afmeting: 17,5 x 9,5 cm
- Hypoallergeen
- Glasvezelvrij

Gebruik

- Was je handen met water en zeep.
- Breng het masker aan met de blauwe kant naar buiten en de kant met neusclip naar boven. Raak hierbij enkel de elastieken aan.
- Vermijd het aanraken van de (witte) binnenkant van het masker
- Trek het masker ietwat open zodat neus en kin bedekt zijn.
- Duw de neusclip van boven naar de zijkanten van de neus met de vingertoppen van beide handen tegelijkertijd. Vorm de neusclip volgens de contouren van de neus.
- Mondmasker vervangen: na max. 4 uur/indien nat of vuil.

Inhoud

Verpakking 50 stuks

Bewaring

- Op kamertemperatuur bewaren.
- Vervaldatum: 36 maanden na productiedatum onder normale omstandigheden en goed

afgesloten verpakking.

Medisch hulpmiddel klasse I, niet steriel

Versie: 26/04/2024

