

000/5170.203/30



Omron RS4 Polsbloeddrukmeter

Nauwkeurig, betrouwbaar en praktisch

De compacte, gebruiksvriendelijke OMRON RS4 meet de bloeddruk en de hartslag nauwkeurig en snel. Het apparaat maakt voor het comfortabel, gecontroleerd opblazen gebruik van de vooruitstrevende “IntelliSense” technologie, waardoor het vooraf instellen van de druk of opnieuw opblazen niet meer nodig is.

Eigenschappen

- De polsbloeddrukmeter is voorzien van een duidelijk LCD-display en is eenvoudig te bedienen.
- De led-positioneringssensor bepaalt of de meter zich op de juiste positie t.o.v. het hart bevindt en zorgt zo voor nauwkeurige resultaten.
- Dankzij de *Intellisense* technologie verloopt de meting heel vlot en zonder een lange en onaangename hoge druk.
- Pompt en ontluft automatisch.
- Valt automatisch uit (batterijbesparing).
- Geheugenopslagcapaciteit: 60 metingen.
- Universeel manchet voor elke polsometrek; meting zowel aan linker- als rechterpols mogelijk.
- Meetbereik:

- Bloeddruk: SYS 60 tot 260 mmHg / DIA 40 tot 215 mmHg
(nauwkeurigheid binnen ± 3 mmHg).
- Hartslag: 40 - 180 slagen/minuut
(nauwkeurigheid binnen $\pm 5\%$ van de weergegeven waarde).
- Garantie: 3 jaar vanaf de datum van aankoop (niet op de manchet).

Toepassingen

- Verificatie van bloeddruk en hartslag. De hypertensie-indicatiebalk geeft aan of er aan het einde van de meting hypertensie wordt gedetecteerd.
- Opvolging ochtendhypertensie: weergave gemiddelde ochtendmetingen binnen 4 weken
- Detecteren van hartritmestoornissen

Gebruik

Zie bijgevoegde gebruiksaanwijzing.

Opmerkingen

- De bloeddruk in uw linkerarm kan verschillen van die in uw rechterarm. Gebruik daarom altijd dezelfde arm voor het meten van de bloeddruk.
- Verwijder strak zittende, dikke kleding en eventuele accessoires van de pols tijdens een meting.
- Blijf stilzitten zonder te praten of te bewegen totdat de meting is voltooid.
- Houd de meter op harthoogte tot de meting is voltooid.

Inhoud

- 1 meter
- 2 "AAA"-alkalinebatterijen
- 1 opbergdoosje
- 1 gebruiksaanwijzing

Bewaring

- Bewaren in gesloten opbergdoosje.
- Vermijd licht, vochtigheid en hoge temperaturen.

Dit medisch hulpmiddel werd klinisch gevalideerd bij de algemene populatie.

Versie: 05/05/2024