

000/0130.011/30

Noseblot, absorberend staafje bij neusbloedingen



100% veilig en puur

exclusief te koop bij MExT

Noseblot is een snel uitzetbaar sponsje ter behandeling van neusbloedingen. Het Noseblot neusstaafje past perfect in de neusholte en blijft stevig zitten.



Eigenschappen

- Het neusstaafje wordt zacht in contact met bloed, zet uit en zorgt voor een zachte druk in de neusholte die het bloeden stelpt.
- Absorptie binnen 0-2 seconden dankzij sponsachtige, poreuze structuur.
- 100% uitzetting in 7 seconden bij 37°C.
- Kleeft niet in de neusholte: gemakkelijk te verwijderen (vermindert het risico op nieuwe bloedingen).
- Latex-, stof- en vezelvrij. Miniem risico op allergieën.
- Biologisch afbreekbaar.

- Staafjes zijn individueel en steriel verpakt in aluminium pouches.
- Afmeting: 4,5 x 2 cm

Toepassingen

Ter behandeling van neusbloedingen.

Gebruik

- Was eerst de handen alvorens het neusstaafje uit de verpakking te halen.
- Noseblot in de neusholte inbrengen, zorg dat er min. 1 cm van het staafje buiten de neus blijft.
- Het neusstaafje wordt zacht in contact met bloed en zet uit. Het past zich perfect aan de neusholte aan en blijft stevig zitten.
- Het neusstaafje laten zitten zolang de bloeding aanhoudt, gewoonlijk gedurende 10-15 minuten.
- Het neusstaafje voorzichtig verwijderen. Indien de bloeding niet is gestopt, herhaal dan de behandeling met een nieuwe Noseblot nog éénmaal. Indien na de tweede behandeling de bloeding nog niet gestopt is, raadpleeg een arts.



Inhoud

doosje 3 stuks

Bewaring

- Droog bewaren.
- Bewaren tussen 5 en 35°C.
- Beschermen tegen direct zonlicht en hitte.
- Eenmalig gebruik.
- Houdbaarheid: 5 jaar na productiedatum.

Dit product is een klasse I steriel medisch hulpmiddel, CE1639 approved onder MDR

Versie: 11/05/2024