

000/0020.114/30



Duoskin+ blauw, waterdichte, metaaldetecteerbare pleister

Duoskin+ blauw metaaldetectable is een blauwe tweedehuidpleister met metaalstrip onder het niet-inklevend kompres.



Eigenschappen

- Afmetingen: 6 x 8 cm.
- Absorberend, niet-inklevend kompres.
- Ondoorlaatbaar voor water en bacteriën.
- Laat de huid ademen.
- Blauwe film.
- Individueel verpakt.
- Metaaldetecteerbaar: onder het wondkussen zit een metaalstrip waardoor deze pleisters gedetecteerd kunnen worden door een professionele metaaldetector.

Toepassingen

- Oppervlakkige snij- en schaafwonden.
- Niet geschikt voor sterk bloedende, diepe of geïnfecteerde wonden.
- Geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.
- Eenmalig gebruik.



Gebruik

Aanbrengen van de pleister

- Reinig eerst de wonde.
- Maak de verpakking open.
- Verwijder strip '1'.
- Aanbrengen op droge huid en zonder het kompres aan te raken.
- Verwijder strip '2'.
- Lichtjes aandrukken op het gehele oppervlak.
- Verwijder strip '3'.
- Druk de pleister rond de wonde goed aan.

Verwijderen van de pleister

- De pleister kan verwijderd worden door deze aan één hoek los te maken en evenwijdig met de huid uit te rekken.

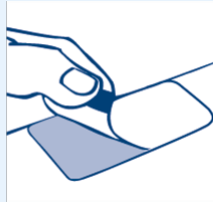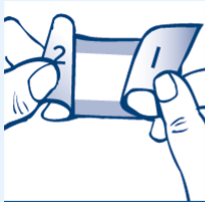

Inhoud

Doos 30 stuks

Bewaring

- Vervaldatum: 59 maanden na productiedatum.
- Bewaren op een koele, droge en donkere plaats, tussen 10 en 25°C.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel. CE approved.

Versie: 05/05/2024